

Anwendung: Der GRÜNSPECHT Handwärmer zur Einmalanwendung wird durch Kontakt mit Sauerstoff aktiviert und erwärmt sich innerhalb von 15 Minuten von selbst. Nur zur äußerlichen Anwendung zum Wärmen der Hände geeignet. Wärmer dazu aus dem Folienbeutel entnehmen und gut durchkneten. Stecken Sie den Wärmer in Ihre Jacken-/Hosentasche oder in den GRÜNSPECHT Bio-Pulswärmer, sobald sich nach einigen Minuten Wartezeit eine spürbare Wärme entwickelt hat. Bei unzureichender Wärmeentwicklung bringen Sie den Wärmer erneut mit Sauerstoff in Kontakt.

Entsorgung: Die Füllung des GRÜNSPECHT Handwärmers enthält Kaliumchlorid, das auch in Pflanzendüngern verwendet wird. Dadurch kann der Handwärmer nach der Anwendung aufgeschnitten und die Füllung im Bio-Müll oder Kompost (2 Stück auf 10 l Kompost oder Bio-Müll, nicht bei Zierpflanzen) entsorgt werden. Nach vollständiger Abkühlung kneten Sie den Handwärmer mit der Hand. Anschließend an der schmalen Kante vorsichtig mit einer Schere öffnen und den Inhalt auf den Bio-Müll oder Kompost leeren (max. 9 Stück pro Monat im Hauskompost entsorgen; in Anlehnung an Studie des Fraunhofer IME, 2019). Bitte beachten Sie dabei unten stehende Sicherheitshinweise. Die restlichen Bestandteile des Handwärmers bitte im Hausmüll sortenrein getrennt entsorgen.

Wichtige Sicherheitshinweise! Nicht auf der gleichen Hautfläche über einen längeren Zeitraum anwenden, um Verbrennungen und Hautreizungen zu vermeiden!

Handwärmer nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen, in der Mikrowelle behandeln, in irgendeiner Form erneut aufwärmen, einstechen oder verbrennen. Nicht anwenden, wenn der Inhalt der Wärmehöhle austritt und/oder der Handwärmer beschädigt oder eingerissen ist. Haut regelmäßig auf Anzeichen für Verbrennungen kontrollieren. Handwärmer bei unangenehmem Hitzegefühl, Hautreizungen, Rötungen oder Brandwunden sofort entfernen.


Nicht anwenden: bei Babys und Kindern unter 12 Jahren; bei Personen mit verringertem Wärme- oder Schmerzempfinden; während des Schlafes; bei verletzter, entzündeter oder empfindlicher Haut; Erfrierungen; Narben; Schwellungen oder Blutergüssen. Die Anwendung sollte bei Personen, die die Handwärmer nicht selbstständig entfernen können, nur unter sorgfältiger Überwachung erfolgen.

Vor der Anwendung an einen Arzt wenden: bei schlechter Durchblutung, Kreislaufproblemen, Herzerkrankungen, Diabetes, Nervenschäden, Einschränkung der Sinnesfunktionen, Hauterkrankungen, rheumatoider Arthritis, Schwangerschaft.

Zur Entsorgung: Lassen Sie den Handwärmer vor der Entsorgung vollständig abkühlen (bis zu 48 Stunden), um eine Entflammung oder Verbrennung zu vermeiden. Achten Sie darauf, direkten Schleimhautkontakt mit der Füllung zu vermeiden. Bei Verschlucken der Inhaltsstoffe oder bei Kontakt mit Schleimhäuten, sofort mit Wasser für mind. 15 Minuten ausspülen. In allen genannten Fällen sollte unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt werden.

Zur Lagerung und Haltbarkeit: Bitte lagern Sie den Handwärmer vor Kindern, Haustieren, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort. Im geschlossenen Folienbeutel ist das Produkt bis zum angegebenen Verfalldatum haltbar.

Inhaltsstoffe: Eisenpulver, Wasser, Vermiculit, Aktivkohle, Salz (Kaliumchlorid).

 GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH
Münchener Str. 21, 85123 Karlskron
Germany

www.gruenspecht.de

REF 145-00-01 Version: 2020-01-31



LOT



Natürlicher Handwärmer



Mit kompostierbarer Füllung*

- Für wohlige warme Hände
- Angenehm weich und flexibel
- Füllung zu 100% kompostierbar*
- Handliche Größe



*bei haushaltsüblicher Anwendung

1 Stück
(7x10 cm)

Hier öffnen/Open here ↑